

GEBRAUCHSANWEISUNG,  
BITTE AUFMERKSAM LESEN!

# EMCUR® HÜHNERAUGEN KOMBI



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Emcur® Hühneraugen Kombi enthält ein Ätzmittel.



Gebrauchsanweisung beachten!

## WAS IST EMCUR® HÜHNERAUGEN KOMBI?

Zweckbestimmung: Emcur® Hühneraugen Kombi ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Hühneraugen. Gehen Sie bei Verwendung und Umgang mit diesem Produkt sorgfältig vor, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Emcur® Hühneraugen Kombi ist speziell für die lokale Anwendung auf Hühneraugen an den Füßen ausgelegt.

Das Produkt kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren verwendet werden.

Die Emcur® Hühneraugen Kombi ist für Schwangere und stillende Frauen geeignet.

Die Lösung zieht sofort in die Haut ein. Sie entfaltet ihre Wirkung durch das Aufweichen, Zersetzen und Befeuchten des Hühnerauges. Das Hydrokolloid-Pflaster sorgt für eine optimale Befeuchtung und lindert Schmerzen.

## WAS IST EIN HÜHNERAUGE?

Hühneraugen sind kleine, verhornte Bereiche der Haut. Sie bilden sich in den meisten Fällen durch Druck, der auf knöcherner Erhebungen ausgeübt wird. Die Haut verdickt sich dadurch auf natürliche Weise, um sich zu schützen. Hühneraugen sind oft schmerzhaft, wenn sie Druck ausgesetzt sind. Innerhalb des Hühnerauges befindet sich ein dunklerer Hautbereich, der fälschlicherweise oft für eine Wurzel gehalten wird. Dabei handelt es sich jedoch um den Kern des Hühnerauges, einen Bereich mit der Form eines umgekehrten Kegels, der aus verdichteter Haut besteht: der druck- und schmerzempfindlichste Bereich. Hühneraugen können an jeder Stelle des Fußes auftreten und unterschiedlich schmerzhaft sein. Sie können sich auch zwischen den Zehen bilden, wenn zwei Gelenke gegeneinander reiben.

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Reinigen und trocknen Sie die Stelle, an der sich das Hühnerauge befindet.

Wenden Sie die Emcur® Hühneraugen Kombi wie folgt an:

Kappe vom Stift abnehmen.

Massieren Sie den Bereich des Hühnerauges sanft mit der Spitze des Stiftes. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Hühnerauge behandelt wird und die Flüssigkeit nicht mit der umgebenden gesunden Haut in Kontakt kommt.

Die Behandlung jeden 2. Tag wiederholen. In den ersten 14 Tagen kleben Sie bitte zusätzlich nach der Anwendung ein Hydrokolloid-Pflaster auf.

Platzieren Sie das Hydrokolloid-Pflaster auf die behandelte Stelle. Stellen Sie sicher, dass die Ränder fest an der Haut haften.

Falls Sie beim Auftragen der Lösung ein unangenehmes Gefühl spüren, kann die Hautoberfläche mit Wasser gespült werden.



Die Spitze des Stiftes ist etwas feucht, aber niemals nass. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich noch Lösung im Stift befindet, können Sie die Spitze des Stiftes auf ein Papiertuch drücken, und wenn Sie einen feuchten Abdruck auf dem Papier sehen, befindet sich im Stift noch Flüssigkeit.

Beachten Sie, dass die Spitze des Stiftes relativ trocken aussieht, da nur eine geringe Menge an Flüssigkeit erforderlich ist, um eine Wirkung zu erzielen.

## MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es ist wichtig, das Produkt wie vorgeschrieben zu verwenden.

Tragen Sie von dem Produkt nicht mehr auf als vorgeschrieben, da es andernfalls zu einem leichten vorübergehenden Ulkus (Geschwür) oder vorübergehenden Effekten wie Brennen, Schmerzen oder Hyper- bzw. Hypopigmentierung an der behandelten Stelle der Haut kommen kann.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.



## WARNUNGEN UND VORSICHTS- MASSNAHMEN

Tragen Sie die Lösung nicht auf andere Körperteile auf, insbesondere nicht auf das Gesicht und die Genitalien.

Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt enthält ein Ätzmittel. Gehen Sie beim Umgang mit dem Produkt sorgfältig vor und beachten Sie die Anweisungen. Wenn Sie Diabetes haben, sollten Sie vor dem Gebrauch ihren Arzt konsultieren.

Verwenden Sie die Emcur® Hühneraugen Kombi nicht, wenn Sie gegen die im Produkt enthaltenen Inhaltsstoffe oder Bienenstiche bzw. Ameisenbisse allergisch sind.

Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit gesunder Haut in der Umgebung des Hühnerauges.

Verwenden Sie das Produkt nicht auf wunder, blutender, gereizter oder entzündeter Haut. Bitte auch nicht auf Hautblasen anwenden.

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn die Lösung zur Behandlung auf sensible Haut und bei Kindern aufgetragen wird. Im Zweifelsfall sollte nur eine sehr kleine Menge des Produktes aufgetragen werden.

Die empfohlene Anzahl von Anwendungen nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn der behandelte Bereich rot bzw. schmerzhaft wird oder sich entzündet.

Nicht in Kombination mit anderen Produkten gegen Hühneraugen verwenden.

SOLLTE DAS PRODUKT VERSEHENTLICH IN KONTAKT MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN KOMMEN, DIESE 15 MINUTEN LANG MIT REICHLICH WASSER SPÜLEN UND EINEN ARZT KONSULTIEREN.

## DARREICHUNGSFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

Emcur® Hühneraugen Kombi enthält einen Behandlungsstift mit 3 ml Lösung und 7 Hydrokolloid-Pflaster sowie diesen Beipackzettel.

Die Emcur® Hühneraugen Kombi ist für Schwangere und Stillende geeignet.

## INHALTSSTOFFE

Formic acid (60 %), ethyl lactate.

## AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie die Emcur® Hühneraugen Kombi bei 2 bis 30 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in seiner Originalverpackung und außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern auf. Das Produkt nicht nach dem Verfalldatum oder über 6 Monate nach dem ersten Abnehmen der Kappe vom Stift verwenden. Setzen Sie die Kappe nach dem Gebrauch vorsichtig wieder auf und drücken Sie darauf, bis Sie ein Klicken hören.

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE



Vorsicht!



Emcur® Hühneraugen Kombi zwischen 2 und 30 °C aufbewahren.



Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Nach Anbruch bis zu 6 Monate anwendbar. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.



Charge



Verwendbar bis



Ätzend



Die Anforderungen der Medizinprodukt-richtlinie werden eingehalten.



Medizinprodukt



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar (Behandlungsstift)



Nur für den Einmalgebrauch (Hydrokolloid-Pflaster)



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten

## STAND DER INFORMATION

Februar 2022



Unigroup ApS  
Diplomvej 373  
DK-2800 Lyngby

## Vertrieb

Emcur GmbH  
Mainzer Straße 1c  
DE-56130 Bad Ems

[service@emcur.com](mailto:service@emcur.com)

Mehr Informationen unter [www.emcur.com](http://www.emcur.com)



101021

CE 0425

