



EMSAN®

NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN® NASENSPÜLSALZ *multimineral*

Medizinprodukt

Bei Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* handelt es sich um ein hochwertiges Medizinprodukt zur intensiven Reinigung der Nase.

Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20.

Mit dieser sorgsam auf das natürliche Nasensekret abgestimmten Mineralsalzmischung reinigen Sie Ihre Nase auf gründliche und dabei schonende Weise von Schadstoffen wie Staub, Schmutz, Krankheitserregern und Allergenen.

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* mit:

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entzündlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- Natürliches Quellsalz mit Mineralstoffen und Spurenelementen zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* enthält keine chemischen Zusätze zur Konservierung und Verbesserung der Fließeigenschaften.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Zur gründlichen und regelmäßigen Spülung der Nasenhaupthöhle und damit zur intensiven Befeuchtung, Reinigung und Unterstützung der Funktion der Nasenschleimhaut

- bei häufig auftretendem Schnupfen
- zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten
- bei trockener Nase und festen Borke
- bei starker Staub- und Schmutzbelastung
- bei Pollenallergie
- bei chronischen Entzündungen der Nase und der Nasennebenhöhlen

Dosierungsanleitung:

Zur Herstellung einer Nasenspüllösung wird jeweils der Inhalt eines Beutels Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* in 250 ml handwarmem Wasser (Füllvolumen der Emsan® Nasendusche) aufgelöst. Bitte achten Sie auf die vollständige Lösung des Salzes durch kräftiges Schütteln und Schwenken, bei nicht vollständiger Lösung kann es zu Reizerscheinungen wie z. B. Brennen oder Kribbeln kommen.

Nasenspülungen können bis zu 3 x täglich mit je 250 ml Lösung durchgeführt werden. In der Regel empfiehlt sich die Durchführung 1 x täglich. Im Rahmen langfristiger Spültherapien (mehrere Monate und Jahre) haben sich auch Spülbehandlungen alle 2 – 3 Tage bewährt.



EMSAN®

NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

Bitte beachten:

Wichtig ist das Einhalten der richtigen Konzentration der Spüllösung, da zu hoch oder zu niedrig konzentrierte Spüllösungen zu Reizerscheinungen und Nebenwirkungen führen können. Mit der Emsan® Nasendusche und Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* lässt sich durch die aufeinander abgestimmten Füllvolumen eine optimale Konzentration der Spüllösung ganz einfach herstellen. Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* nach Vorschrift aufgelöst ergibt immer eine isotone, d. h. dem Mineralstoffgehalt des Blutes angepasste Salzlösung.

Das zur Herstellung der Spüllösung verwendete Wasser darf nicht wärmer als 50 °C sein, muss Trinkwasserqualität haben und sollte immer frisch sein. Da Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* keine Konservierungsstoffe enthält, ist die hergestellte Spüllösung unmittelbar zu verbrauchen. In besonderen Krankheitsfällen, wie z. B. bei Mukoviszidose (zystischer Fibrose) oder unmittelbar nach operativen Eingriffen sowie bei unklarer Trinkwasserqualität, soll steriles oder abgekochtes Wasser verwendet werden.

Gegenanzeigen:

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* sollte nicht angewendet werden bei:

- Verletzungen am Nasendach und den Nebenhöhlenwänden, bei denen direkte Verbindungen zu den Flüssigkeitsräumen des Gehirns bestehen
- starkem Nasenbluten

Anwendungsdauer:

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* kann unbegrenzte Zeit angewendet werden, vorausgesetzt, die Spüllösung wird immer in der richtigen Konzentration hergestellt.

Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann es zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase kommen.

Bitte beachten Sie:

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatums verwendet werden. Bitte lagern Sie Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* immer außer Reichweite von Kindern.

Packungsgrößen:

Emsan® Nasenspülsalz *multimineral* ist in Packungen mit 30 Dosierbeuteln a 2,5g erhältlich.

Erläuterung der Symbole:



Charge



Gebrauchsanweisung beachten!



Verwendbar
bis



Die Anforderungen der Medizin-
produkterichtlinie werden ein-
gehalten



Hersteller

Stand der Information: August 2019

