

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN®

BABYNASENTROPFEN

Medizinprodukt

Liebe Eltern, liebe Anwender,
Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden!

Es enthält:

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entzündlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- Natürliches Quellsalz zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 1g Mineralsalzmischung, gereinigtes Wasser (Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20).

Emsan® Babynasentropfen sind garantiert frei von Konservierungsstoffen, Treibgasen und allergieauslösenden pflanzlichen Substanzen.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Emsan® Babynasentropfen befeuchten, reinigen und befreien die Nasenschleimhaut z.B. bei Schnupfen und/oder verstopfter Nase und sind gerade bei häufig wiederkehrendem Säuglingsschnupfen auch für eine längere Anwendung geeignet.

Dosierungsanleitung:

Je nach Bedarf mehrmals täglich einen Tropfen Emsan® Babynasentropfen in jedes Nasenloch geben. Dabei ist die Tropferspitze zur Entnahme des Tropfens möglichst wie auf der Abbildung nach unten zu halten. Ab dem ersten Tag, für Säuglinge und Kleinkinder. Wir empfehlen eine Verwendung der Emsan® Babynasentropfen bei Raumtemperatur.



Hinweis:

Vor der ersten Benutzung der Emsan® Babynasentropfen blaue Schutzkappe abnehmen, die Flasche mit der Tropferspitze nach unten halten und 8–10 mal pumpen, bis der erste Tropfen austritt. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich nach jedem Gebrauch den Tropfer trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheiten sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden. Sollten Sie Emsan® Babynasentropfen längere Zeit nicht benutzt haben, pumpen Sie den ersten Tropfen zur Reinigung des Adapters ebenfalls mit der Tropferspitze nach unten in die Luft.

Gegenanzeigen:

Bisher keine bekannt.

Anwendungsdauer:

Verwenden Sie Emsan® Babynasentropfen nicht länger als 30 Tage ohne Unterbrechung. Nach einer Unterbrechung von mindestens 2 Tagen können Emsan® Babynasentropfen wieder verwendet werden. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Babynasentropfen nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch kann es lediglich in Einzelfällen zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase und leichtem Nasenbluten kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie Sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Bitte beachten:

Emsan® Babynasentropfen wurden ohne Konservierungsmittel in einem Spezialpumpsystem abgefüllt, daher können sie nach Anbruch bis zu 6 Monate angewendet werden.

Emsan® Babynasentropfen sollten nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatums verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

Hinweis:

20 ml Emsan® Babynasentropfen entsprechen ca. 400 Einzeldosen. Damit sind Emsan® Babynasentropfen, z.B. bei einer Dosierung von 2 Tropfen täglich, ausreichend für eine mehr als 6 Monate dauernde Behandlung.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 ml Lösung zum Eintropfen in die Nase.

Erläuterung der Symbole:



Charge



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten



Medizinprodukt



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



Für Kinder unzugänglich aufbewahren



Hersteller

Stand der Information: 2022-09



Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems

www.emcur.com

service@emcur.com

NOT27305V02 · 532462 3 DA

